

成長期の子供  
の歯と顎の発  
育のために

2~5才



*infant*<sup>TM</sup>  
TRAINER

WORLDWIDE PATENTS: 5,259,762; 5,624,257; 656715; 676142;  
60/618,691 (PATENT PENDING); 10/639,149 (PATENT PENDING)

子供の正常な成長と発育は健康や教育と同様に重要なことです。子供の成長は2~5才で最も急速です。この間に子供の顔や顎の70%が完成します。残念なことに大部分の子供達が正常な顔や顎の発育をしていないので、結果として魅力のない顔や叢生の歯列を生じています。

子供は生まれつき物を噛みたがります。これは重要な衝動であり、顎が正常な発育をするために必要な運動を与えます。

原始人は硬い食物、骨、生野菜などを食べるので顎が発達します。現在の子供達

はこの種の食物をあまり食べないので、顔や顎の発達に関連した多くの問題に遭遇します。子供の本能は噛むことであり、それによって顎の発育が促進されます。しかし現在の食物はこの目的を満たしていません。

また子供達は指しゃぶり、異常な嚥下、口呼吸のような癖を発達させます。これらの癖は顎の劣成長、下顎の後退、叢生などを生じさせます。これらの癖を早期に防ぎ、子供の潜在力を発揮させることが最善です。


## INFANT TRAINER™

Myofunctional ResearchのINFANT TRAINER™は、子供が顎の筋肉を使用している間に正しく噛むことを訓練するものです。重要なことはINFANT TRAINER™が子供に鼻を通して呼吸をさせ、正しい嚥下法と舌の位置付けを訓練することです。研究報告によれば正常な顔、顎、歯の発育はそれらの要因と強く関連していることが示されています。

INFANT TRAINER™は子供が成長したときにブレースや抜歯のような歯列矯正治療を受ける必要性を防ぎます。MRCは混合歯列期用あるいは永久歯列期用のTRAINERをもっており、子供が6~12才の永久歯が萌える時期に正しく成長することを確実にします。より多くの情報は[www.myoresearch.com](http://www.myoresearch.com)を参照してください。

**infant**™  
TRAINER

- ① エアースプリング
- ② タンタグ
- ③ タンガード
- ④ ストラップ-鎖

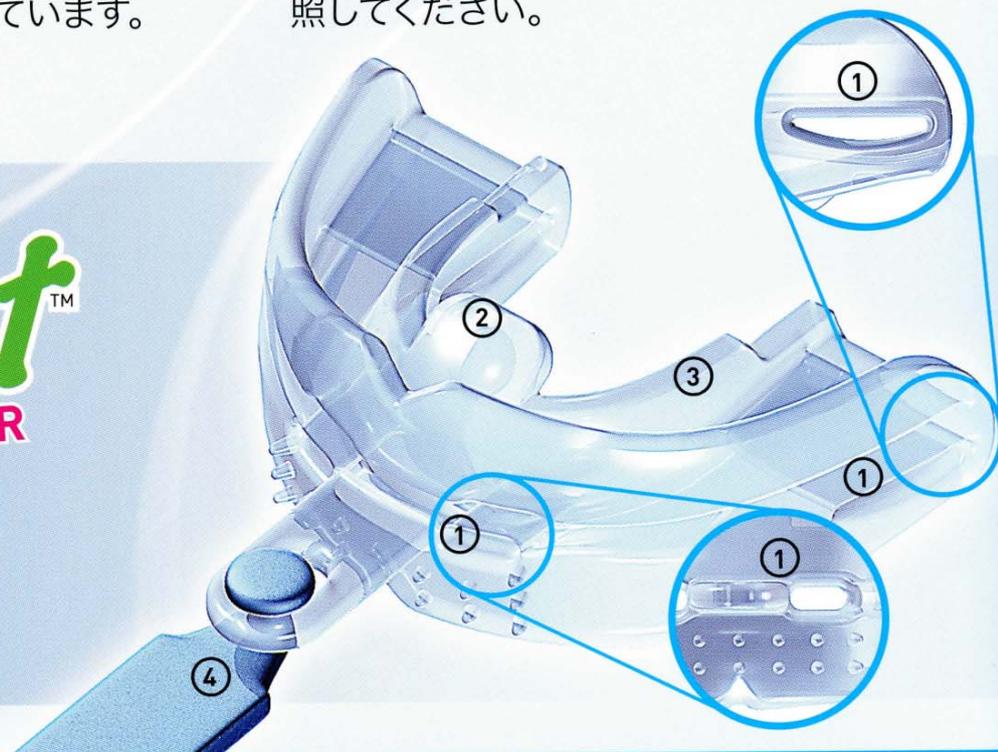



## 効能効果

INFANT TRAINER™は子供の成長と発育を促進するためにいくつかの重要な構造をもっています:

- ① エアースプリングは成長する顔と顎の筋肉に穏やかな刺激を与えます。
- ② タンタグは子供が正しい舌の位置を保持し、正しい嚥下法をするように訓練します。
- ③ タンガードは装着時に指しゃぶりと舌突き出しを防止します。やっかいな癖を停止させ、将来の歯列と顎関節(TMJ)の障害を防ぎます。

研究報告によれば口呼吸者は鼻呼吸者と比較すると魅力のない顔立ちになるということです。INFANT TRAINER™の設計により子供は鼻を通して呼吸することを訓練されます。呼吸パターンの変更が顎の成長を正常化し、健康状態を改善することが示されています。

### 衛生

INFANT TRAINER™は必要ならば沸騰水中で10分間の滅菌ができます。通常は温水ですすぎ、専用の容器に戻しておくだ

けで十分です。

### 便利なストラップ-鎖

幼児はINFANT TRAINER™を短時間使用し、おしゃぶりのようにすぐ吐出します。やがて子供は再び吸いたいと感じ、INFANT TRAINER™を口に戻したくなります。各装置には簡単に取外せるストラップが付いています。ストラップは子供の衣服に取付けられ、吐出した時にINFANT TRAINER™が床に落ちるのを防ぎます。子供がINFANT TRAINER™を就寝前に使用した場合には、翌朝ストラップにより容易に発見することができます。



# INFANT TRAINER™はTRAINER System™の一部です

大部分の子供達が顎や顔を正常に発育させていないことはよく知られています。その結果叢生や魅力のない顔が生じます。柔らかい食物、おしゃぶり、指しゃぶり、幼児カップ、口呼吸などはすべて顔や歯列の発育に寄与しません。原始人は硬い食物を食べ、おしゃぶりや幼児カップはなく、アレルギーをもっていませんでした。その結果彼らはよく発達した顎、真直ぐな歯、幅広く魅力的な顔貌をもっています—虫歯はありません。

INFANT TRAINER™には大きな三機能があります:顎と顔の筋肉に(4個所の独立したエアースプリングを通して)穏やかな運動を与えます;舌の正しい位置付けと嚥下方法を訓練します(タンタグ);鼻を通した正しい呼吸法を促進します。

## Myofunctional Effect™

TRAINER System™の全装置は口腔筋を訓練するように設計されています(Myofunctional Effect™)。それは正しい歯と顎の配列に寄与します。

放置された場合は、口呼吸、異常な嚥下、舌突出しのような筋機能癖が顔や歯列の発育、あるいは将来の歯列矯正に有害な影響を与えるでしょう。



## 使用説明

毎日2回10~20分間使用してください—子供の顎筋肉、嚥下、呼吸法に効果を与えるにはこれで十分です。



口の中にINFANT TRAINER™を入れてください。



INFANT TRAINER™を穏やかに噛んでください。



唇を合わせ、鼻を通して呼吸をしてください。

親の監督のもとに使用することが勧められます。効果を高めるために夜間使用も可能です。

INFANT TRAINER™は医療用シリコーンとTPR(熱可塑性ゴム)で造られています。PVCやLATEXは含まれません。

